

## ★ 使用时注意事项

### 01.最佳训练距离:

①9.7-13英寸显示屏距离25-30cm;②14-19英寸显示屏距离40cm;

③视力低于0.3的患者,以患者能看清屏幕画面距离为最佳。

### 02.最佳训练环境:半暗室内;确保训练设备屏幕无反光;

03.贝视优患者端、院内管理端都需要连接网络方可使用;

04.患者端可在电脑、平板、ipad下载使用 (windows7以上、平板内存4G以上);

05.ipad不支持armv7机型 (例如: iPad1、iPad2、iPad3、iPad4、iPad mini1等);

06.如患者需佩戴屈光屈光眼镜,训练时需全程佩戴;

07.进行单眼视觉刺激、视觉精细治疗时,须遮盖另一眼;

08.进行同时视、融合视、立体视训练时,应配戴好红蓝眼镜 (右蓝左红,不可反向),  
戴有矫正眼镜的请将红蓝眼镜戴在矫正眼镜的外面,刺激精细训练无需佩戴红蓝眼镜;

09.使用前,须经专业眼科医生完善检查、明确诊断和适应症,排除器质性病变;

10.旁中心注视者须先纠正至中心注视;

11.使用过程中请严格遵医嘱训练,定期复查,及时调整训练方案;

12.视力和视功能提升后须按医嘱进行巩固治疗,防止复发和回退;

13.“视觉精细”模块没有视频训练,视频训练后台得分为0;

14.训练时长会根据医嘱提供的训练方案倒计时,在规定时间内,

患者可任意选择该模块视频或游戏;

15.微信小程序搜索“贝视优家长端”,即可绑定训练账号,查看训练曲线及完成情况;

16.如训练过程中暂时离开 (本次训练内容未完成):

①退出主界面 (软件不会倒计时),②退出软件 (再次进入会继续前次训练);

17.患者登陆客户端扣费一次,本次训练完成之前可以多次登陆,不重复扣费 (当日有效)。



请联系客服: 400-090-1800

详情请关注公众号: 优视妈妈

客服服务时间: 早8:00-晚22:00

贝视优®  
BESTVISION

## 视觉功能 训练治疗软件

操作指南  
INSTRUCTIONS



用户账号:

登录密码:

## ★ 第一步: 下载安装

1. 安卓平板/电脑PC端: 登录官网官网  
[www.bvtek.cn](http://www.bvtek.cn)

2. 下载适合自己的客户端

立即下载 适用平台: Windows系统

立即下载 适用平台: 安卓系统

立即下载 适用平台: IOS系统

3. 根据向导安装完成



[注意]: 安卓平板及windows适用的极速浏览器  
(可在官网主页下载, 如患者端自带则不需要重复下载) 包括:

- ①国内: 傲游浏览器 (Maxthon)、360浏览器、搜狗浏览器、QQ浏览器、猎豹浏览器等浏览器的极速模式;
- ②国外: Firefox (火狐浏览器)、IE9及其更高版本、Chrome (谷歌浏览器)、Safari、Opera等。

浏览器下载 (用于登录网站管理端)

立即下载 360极速浏览器  
适用平台: Windows系统

立即下载 360浏览器  
适用平台: 安卓系统

## ★ 第二步: 点击登录

1. 输入患者账号和密码  
(点击“记住密码”, 下次可直接登录)。



2. 更改密码: 点击头像进入个人中心-修改密码, 可更改密码



3. 账号信息查询: 点击头像进入个人中心, 可查询剩余次数及其他训练信息



## ★ 第三步: 开始训练


1. 在线检测: 首次登录、更换设备、使用一个月时, 需检测患者训练阈值, 请根据提示操作。




2. 点击大厅中任意游戏进行训练, 点击“操作说明”查看具体操作方法



3. 视频训练: 点击大厅中的“视频训练”

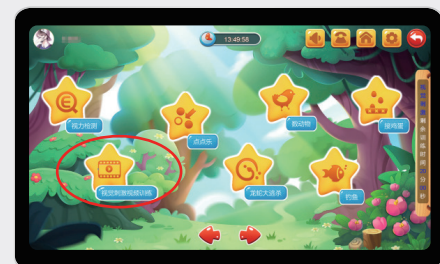

选择磁盘  
(网络视频或mp4格式本地视频)  
“双击播放”

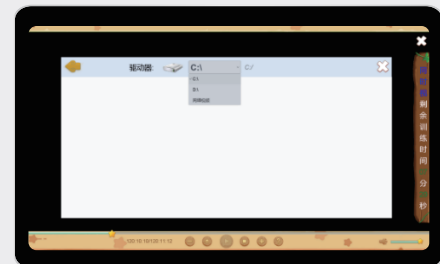

“+”或“-”可调整视频窗口大小

